

検査を始める前に

*** 必ずお読みください ***

【はじめに】

- 血友病の方や、抗凝血剤等の薬を服用されている方は、本製品をご使用になれません。
- 採取した血液サンプルは、50℃以上の場所に12時間以上保管しないでください。
- 血液サンプルはできるだけ採取した同日にご発送ください。
- 付属のランセット(採血針)は、一つのキットに対しご使用できるのはお一人のみです。他の方が使用されたランセットは絶対に再使用しないでください。
- キットはこどもの手の届かない場所に保管してください。

【血液サンプルの採取方法について】

- 血液サンプルを採取する際には、必ず裏面の採取方法を一度お読みください。
- 血液サンプルを採取する前に、手をよく洗ってください。

【廃棄について】


- ランセット及び付属品の廃棄については、各自治体の分別方法に従ってください。

【注意事項】

- 本検査の結果に関する質問については、掛かり付けの医師もしくは専門の医師にご相談ください。
- 本検査は、医師による定期検診に代わるものではありません。


血液サンプルの採取方法

STEP1 付属品が全てそろっているか確認してください。

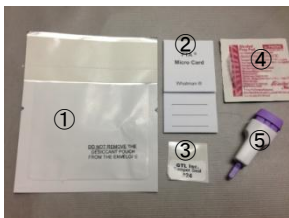

- 【キット内容】
- ① 口糊付き封筒
 - ② FTAカード
 - ③ 番号付シール
 - ④ 消毒綿
 - ⑤ ランセット

STEP2 被験者の氏名（ローマ字）と③のシールに表示されている番号をFTAカードに記入してください。

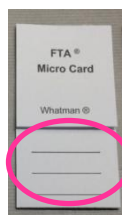

Mr. Ichiro



Suzuki

#412

- * 名字の前にMr.(男性)またはMs.(女性)と記入してください。
- * 上の段に名前、下の段に姓をローマ字でご記入ください。
- * ③のシールに表示されている番号を記入してください。

STEP3 消毒綿で、人さし指もしくは中指の腹を消毒してください。
* 採血する指をマッサージし、温めておくと採取し易くなります。

STEP4 ランセットの先端キャップ（細い方）を引き抜きます。採血する場所（指の腹）にランセットの白い部分をあて、紫色のボタンを押します。
豆粒大の血液の滴ができるまで、ゆっくりと指を圧迫してください。
* 使用済みのランセットは、各自治体の廃棄方法に従ってください。

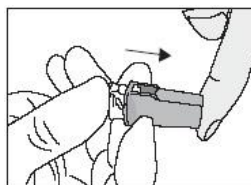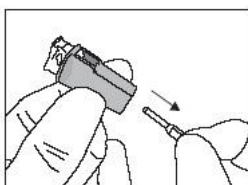

STEP5 FTAカードの円の中に、血液をしっかり塗布してください。



- * FTAカードに血斑を6か所、重ならないように塗布してください。
- * FTAカードの一枚目をめくり、裏面まで血斑が染みていることを確認してください。（染みしていない場合は、重ねて塗布してください。）

STEP6 採血した箇所を消毒綿で消毒してください。止血するまで軽く押さえてください。
FTAカードを乾かし、①の口糊付きの封筒に差し込んでください。
封筒のフタ部分のシールをはがし、しっかりと封をします。その上から③の番号付シールを張り付けてください。
サンプル送付及び同意書にご記入いただき、血液サンプルと併せて返信用封筒に入れ、なるべく同日中にご発送下さい。
* 同意書の右上に、③のシール番号を必ず記入してください。

